

この説明書をよく読んでからご使用ください。

## 【はじめに】

本手順書は、NDTS株式会社でのヨーネ病分析にかかわる糞便採取方法です。他の検査機関におけるヨーネ病分析には用いることができませんので、ご注意ください。



採材容器



採材スプーンは蓋と一体となっています

## 使用方法

### 1) 準備

- ・採材容器の蓋に検体番号を記入

※文字が消えないように、油性マジックをご使用ください





### 2) 便をこすり取る

- ・容器の蓋を空け、採材スプーンを用いて便の表面を撫でるようにこすり取る
- ・便は、スプーンの先端1/3に小盛り程度

※採材スプーンは容器蓋と一体となっています

※草や実など、固形物が入らないようご注意ください

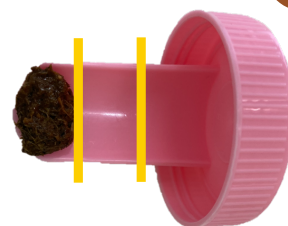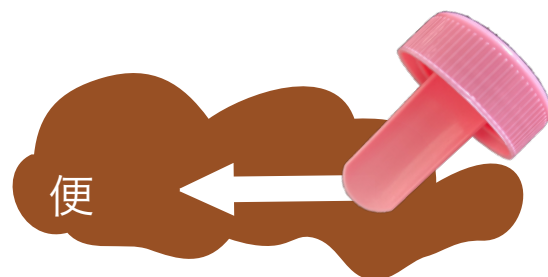

### 3) 便をとったら容器にもどす

- ・便がフチや外へこぼれ落ちないように注意



### 4) 送付

- ・採材後は、速やかに冷蔵(4℃)にて弊社まで送付