

動物対象

SFTSウイルス遺伝子分析 サービスのご案内




SFTS

フェヌイウイルス科のSFTSウイルスによる感染症
主にマダニを介して人や動物に感染
発熱、食欲不振、嘔吐、下痢などの症状を呈する
人の致死率は10~30%と高い
獣医師・看護師・飼主への二次感染リスク



早期遺伝子分析による感染拡大防止が重要

分析のフロー

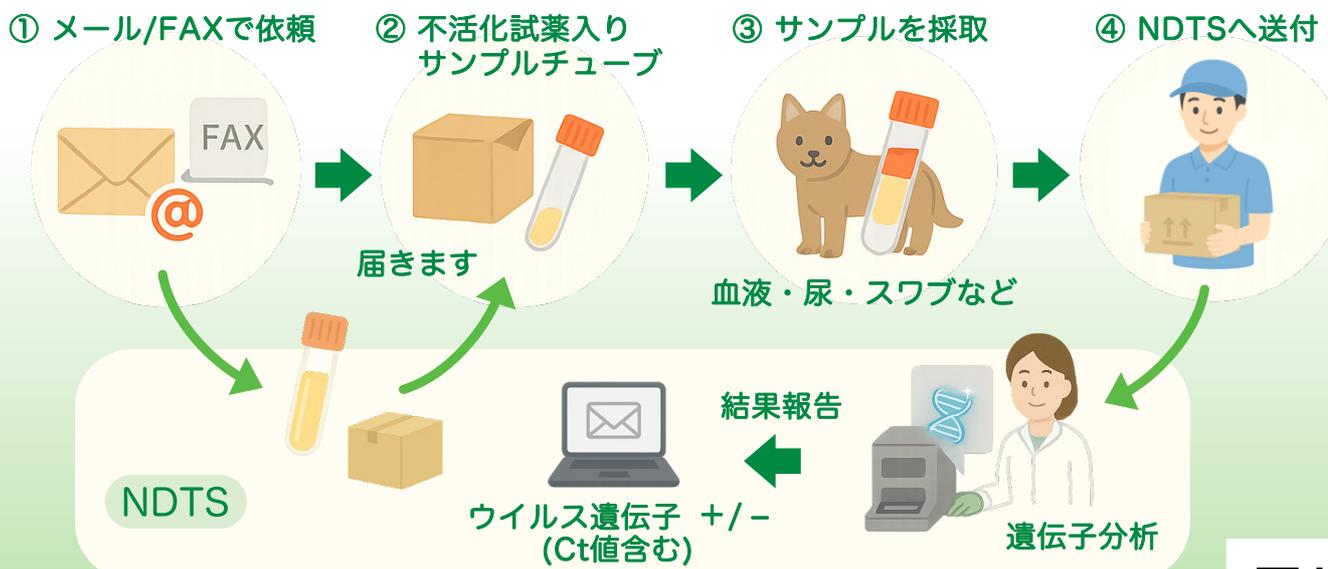

Why NDTs

分析の特徴



信頼



スピード



安全性



不活性化試薬で安全輸送¹⁾

検査管理体制



各工程でチェック



高感度リアルタイムPCR



BSL施設で作業

1) 開発に際しては、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所 危機分析・対応部門 松野啓太先生のご協力を頂きました。

価格・納期

8,000円 / 検体 (税抜)

ご報告：検体到着より5営業日

価格・仕様は予告なく変更される場合があります
2025年11月

注意事項

- ・分析後の検体は、SFTSへの理解を深める目的で研究材料として使用させて頂く場合があります。また陽性例では、臨床情報のご提供をお願いする場合がございます。これらの検体や情報は、国立感染症研究所ならびに北海道大学と共有いたします。
- ・弊社サービスの利用に関して利用者が被った損害又は損失などについては、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- ・利用者が弊社サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、弊社はその一切の責任を負わないものとします。
- ・弊社サービスの遅延・不履行・中止により利用者及び第三者に直接的または間接的に生じた損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- ・弊社の提供するサービスに基づく判断においては、ユーザーの皆様の責任の上でご利用下さい。

無料お試し
キャンペーン

初回 最大4検体

まで

¥0



ふりがな*

事業者名*

部署名

担当者名*

電話番号*

メールアドレス*

@

〒
住所*

専用チューブの
発送本数

4 本

*この項目は必ず記入してください

この面をFAX送信(011-376-0605)してください

サンプルのお取扱とご報告までの手順


① 同梱物の確認



- サンプル容器
- ジッパー付き袋

- 必要本数
- 不活化試薬の漏れ
- 汚れ・破損

! 専用チューブは10~30°Cで保管してください

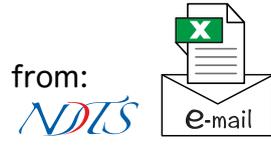

ご注文シートを保存

② サンプルの準備




! チューブ蓋にチューブ番号と不活化剤の有効期限が記載されています

ご注文シートへチューブ番号とサンプル名を記入



検体を専用チューブへ分注
 ・分離血清/血漿 300 μl ※
 ※チューブに記載されたラインまで入れる
 ・臓器 (脾臓・肝臓) 1cm角程度
 ・スワブ (口腔・鼻腔)

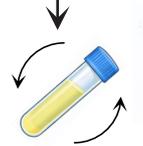

チューブをエタノールで消毒後
転倒混和



15分, 室温静置



チューブをジッパー付き袋へ入れ、袋をエタノールで消毒後
冷凍保存 ❄️



ご注文シートを添付



印刷



ご注文シート

③ ご発送

- サンプル
- ご注文シート
- 冷凍便・午前着指定



検体の入ったジッパー付き袋を梱包し、エタノールで消毒

004-0015
 札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-6-8
 NDT'S株式会社 宛
 電話番号: 011-376-0601

④ 結果のご報告

! 弊社に送付されたサンプルは返却できません

ご登録先にメールで結果をご報告

